

Guía de colocación



- Antes de colocarse la mascarilla, retire el codo de la mascarilla presionando los broches de presión.



- Conecte el codo al tubo de aire del dispositivo.



- Con las dos correas del arnés aflojadas, sostenga la mascarilla contra la cara y póngase el arnés tirando de él por encima de la cabeza.



- Coloque las correas debajo de las orejas, enlace el arnés a las ranuras inferiores del armazón de la mascarilla.



- Despegue y tire de las correas superiores del arnés de modo parejo hasta que se sientan cómodas y firmes, luego vuelva a pegarlas.



- Repita el paso 5 con las correas inferiores del arnés.



- Conecte el conjunto del codo y tubo de aire a la mascarilla presionando los broches de presión y empujándolo hacia el armazón de la mascarilla.
- Encienda el equipo.

Use la mascarilla Mirage FX con el ventilador ResMed S9™ para obtener un sistema cómodo y silencioso que se adapta al estilo de vida de sus pacientes.



Menos mascarilla.
Más naturalidad.



Mirage™ FX. La transformación de la mascarilla nasal.

Prepárese para la única mascarilla nasal que necesitará. Con su balance perfecto entre la comodidad, el desempeño y la sencillez, la mascarilla Mirage™ FX transformará su negocio.

Atractivo instantáneo para sus pacientes

Gracias a su armazón compacto, suave almohadilla y arnés ultrasuave, sus pacientes quedarán encantados con la libertad y comodidad de la mascarilla Mirage FX.

Una mascarilla para todos

Una sola almohadilla y un tamaño de armazón que se acomoda a casi todos los pacientes. Y para los pacientes que necesitan un tamaño más ancho, la mascarilla Mirage FX también está disponible en tamaño Ancho. Para sus pacientes mujeres que deseen una opción personalizada con un tamaño de arnés más pequeño, pruebe la mascarilla Mirage FX para Ella.

Sencilla y efectiva

Su ajuste intuitivo y flexible arnés hacen que lograr el ajuste y sellado perfectos al primer intento sea increíblemente sencillo.

Más eficiencia en su negocio

Reduzca el tiempo que desperdicia en reajustes y reemplazos. Además, con menos códigos de productos y cuatro simples componentes, la administración del inventario se simplifica mucho.



Mirage™ FX
MASCARILLA NASAL


ResMed.com

Mirage™ FX
MASCARILLA NASAL

ResMed.com

Aspectos tecnológicos destacados

- Nuevo soporte para la frente en forma de alas de mariposa que se ajusta automáticamente durante la colocación
- Diseño estilizado que simplifica lograr el sellado sobre el puente nasal
- El suave y flexible arnés es lo único que toca la frente; nada con silicón ni plástico

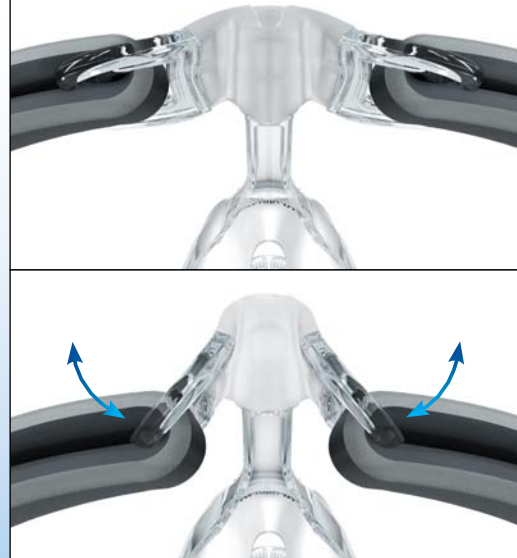

El soporte para la frente flexible en forma de alas de mariposa proporciona un rango dinámico de ajuste. El plástico no toca la piel.

El ligero y resistente armazón es lo suficientemente rígido para mantener la mascarilla en la cara y lo suficientemente suave para adaptarse a los movimientos del usuario durante el sueño.

El diseño de ventilación difusa dispersa el aire suave y silenciosamente, alejándolo de la pareja.

El broche de presión en el codo hace que sea sencillo conectarlo y desconectarlo del armazón.

El nuevo arnés SoftEdge™ contorneado, listo para ajustarse y usarse.

El diseño SoftEdge es suave con la cara, reduciendo las marcas y la incomodidad.

La almohadilla de doble pared Spring Air™ proporciona una distribución uniforme de la presión, con más suavidad en el puente nasal, lo que disminuye la incomodidad de esta sensible área.

Las ranuras para las correas del arnés simplifican el armado y desarmado del arnés y conservan los ajustes óptimos del mismo.



Guía de componentes

Ofrezca a sus pacientes una mascarilla nasal que les ayudará a aceptar el tratamiento más fácilmente y a adoptarlo a largo plazo. Convierta a la **Mirage FX** en la primera opción para sus pacientes de mascarilla nasal.

CÓDIGOS DE LOS PRODUCTOS

Sistema completo



62103 Mirage FX



62118 Mirage FX Ancha



62128 Mirage FX para Ella



Arnés
62110
62129 para Ella



Almohadilla
62111
62125 Ancha

Sistema de armazón (sin arnés)

62112 Mirage FX
62112 Mirage FX para Ella
62126 Mirage FX Ancha

Para obtener más información, consulte el **Manual del Usuario de la mascarilla nasal Mirage FX, Mirage FX Ancha o Mirage FX para Ella.**