

# PHILIPS

sense and simplicity

## SIMPLYGO

**NUEVO**  
**CONCENTRADOR PORTATIL DE OXIGENO**



# Una alternativa real para pacientes ambulatorios


SimplyGo es nuestro primer concentrador portátil de oxígeno que proporciona los beneficios del **flujo continuo** en un diseño de **menos de 5 kg**.

Gracias a ésta ventaja, el SimplyGo puede ser una solución real para la mayor parte de los pacientes en oxígeno que requieran terapia ambulatoria diaria y/o viajar.


Además, SimplyGo elimina la necesidad de entrega regular de oxígeno; los pacientes no tendrán temor a quedarse sin oxígeno.



# Tendencia Concentradores Potátiles

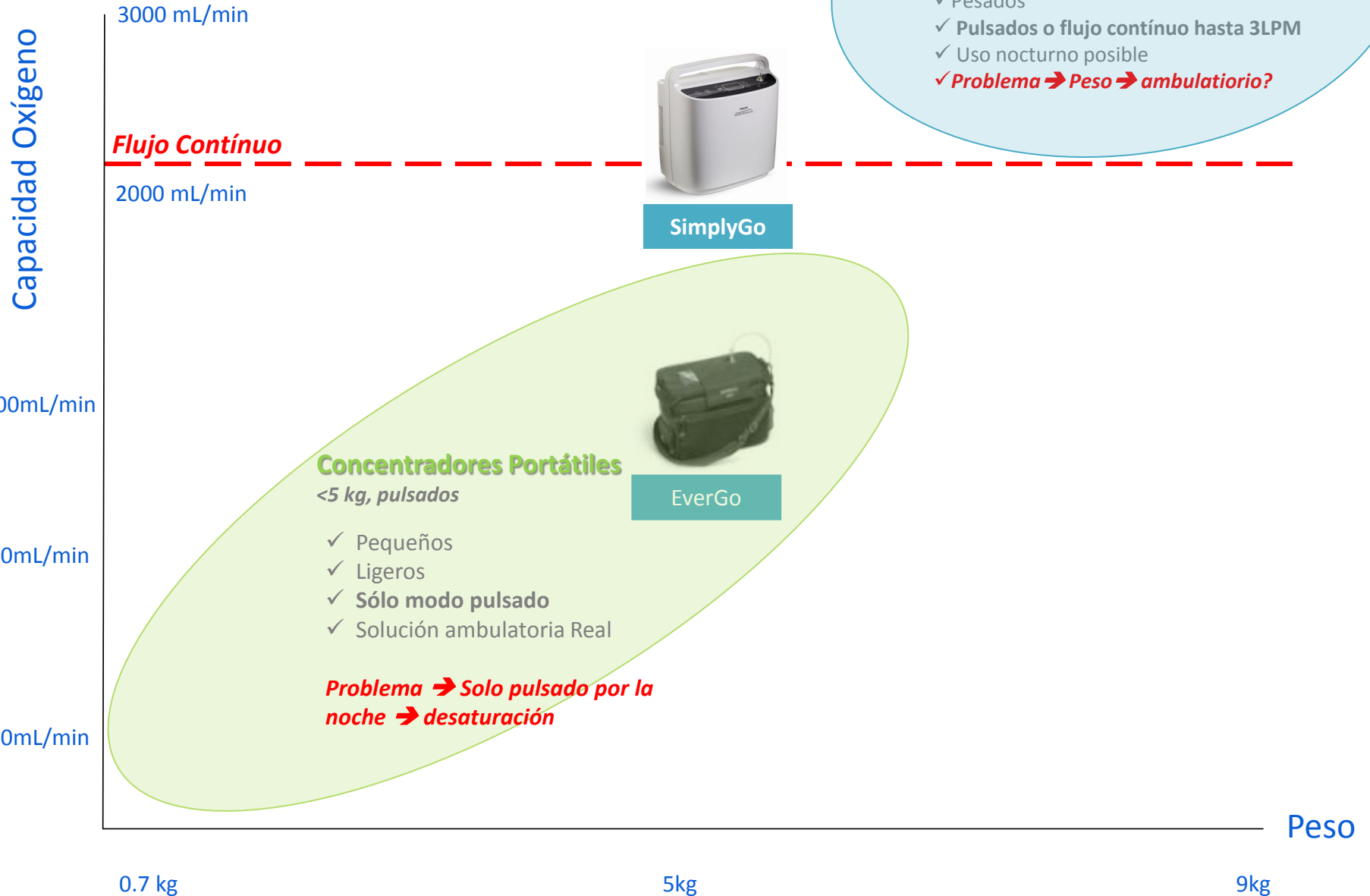

# SimplyGo : Descripción.

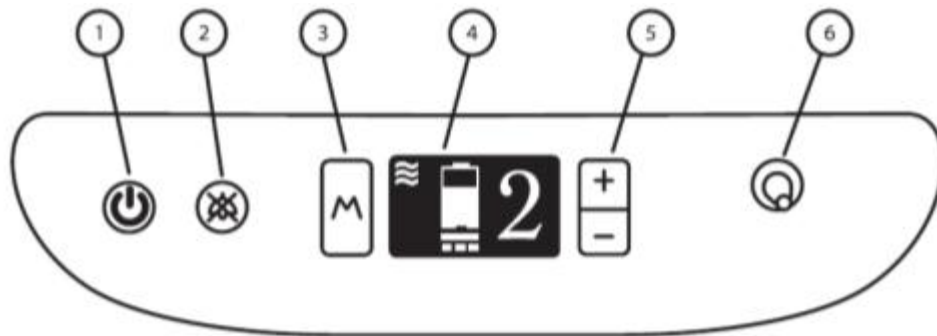

1. Boton encendido: inicio/parada
2. Silenciado de Alarma
3. Selector de modo: continuo – pulsado – nocturno
4. Pantalla
5. Ajuste : Incremento/decremento
6. Conector de cánula de paciente (hasta 9m)

# SimplyGo : Descripción del sistema

Especificaciones	
Peso (incluida batería)	4.5 kg
Vida útil compresor	15 000 hrs
Nivel de sonido	
Pulsado , setting 2 20 BPM	43 dB
Flujo continuo 2 LPM	49 dB
Duración batería	
Pulsado , setting 2 20 BPM	3,5 hrs
Flujo continuo 2 LPM	0,7 hrs
Capacidad de Oxígeno	2000 mL/min
Ajustes	Pulsado: 1 to 6 Continuo : 0,5 à 2 LPM Modo nocturno : pulse 1 to 6
Pureza de Oxígeno	87 – 96%
Filtros	-



# Entrega de Oxígeno

SimplyGo dispone de 3 modos diferentes para satisfacer la mayoría de las necesidades del paciente :

## – Modo Pulsado

*Proporciona a los pacientes una dosis eficiente. Puede ser adaptada a pacientes que usen flujo continuo o que requieran más de 2LPM de flujo continuo.*



Settings 1-6 en incr. de 0.5  
Sensibilidad Trigger = **- 0.16 cm H<sub>2</sub>O**


## – Modo Flujo continuo

*Un beneficio real para pacientes que requieran flujo continuo ambulatorio y/o por la noche*



## – Modo nocturno

*Puede ser usado por pacientes que requieran más de 2LPM de flujo continuo por la noche*

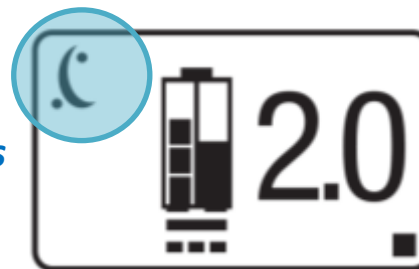

Modo pulsado nocturno  
Trigger: **- 0.11 cm H<sub>2</sub>O**

# Entrega de Oxígeno

## MODO PULSADO



Ajuste	Volumen entregado	Max RPM
1	12 mL	40
2	24 mL	40
3	36 mL	40
4	48 mL	40
5	60 mL	33
6	72 mL	28


## MODO NOCTURNO



Ajuste	Volumen minuto objetivo	15 RPM	20 RPM	25 RPM
1	250 mL	16,7 mL	12,5 mL	10,0 mL
2	500 mL	33,3 mL	25,0 mL	20,0 mL
3	750 mL	50,0 mL	37,5 mL	30,0 mL
4	1000 mL	66,7 mL	50,0 mL	40,0 mL
5	1250 mL	83,3 mL	62,5 mL	50,0 mL
6	1500 mL	100 mL	75,0 mL	60,0 mL

# Entrega de Oxígeno

## MODO PULSADO

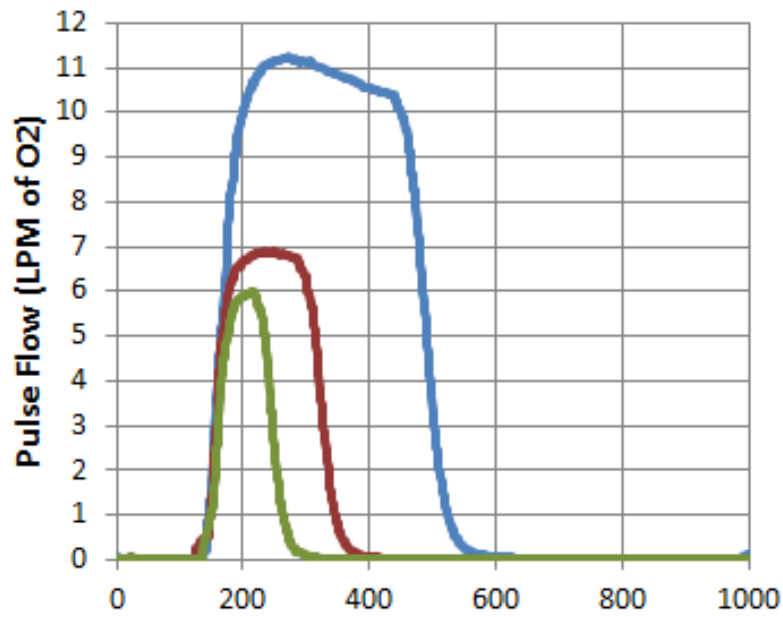


Tiempo inspiratorio (msec)

— daytime 6 @ 20 BrPM

— daytime 2 @ 20 BrPM

— daytime 1 @ 20 BrPM

## MODO NOCTURNO

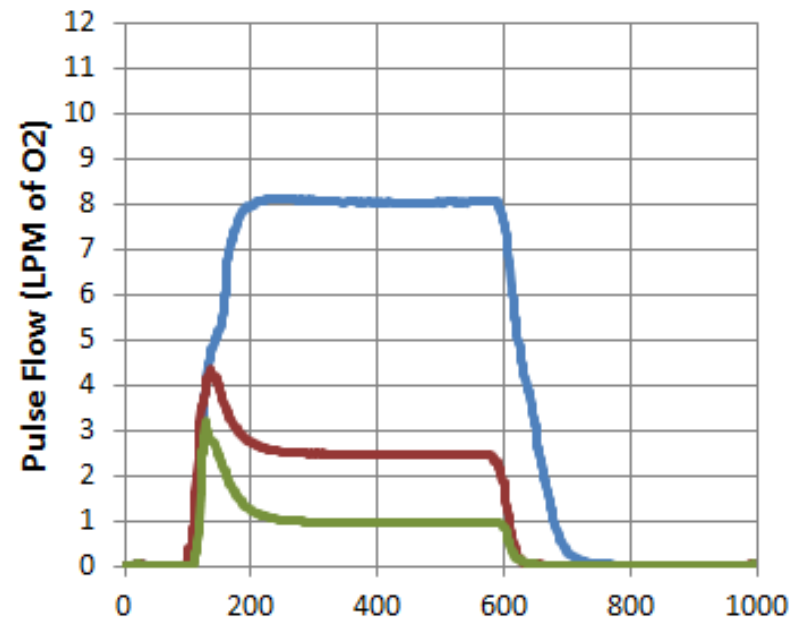

Tiempo inspiratorio (msec)

— nighttime 6 @ 20 BrPM

— nighttime 2 @ 20 BrPM

— nighttime 1 @ 20 BrPM




# Baterías

- SimplyGo dispone de una batería
- Necesidad de apagar el equipo antes de cambiar la batería

		Pulse Dose Setting						Continuous Flow Setting		
		1	2	3	4	5	6	0,5	1	2
Number of batteries	1	3h42min	3 h30min	3h06min	2h42 min	2h18min	1h54min	3h06min	2h18min	42min
	2	7h24min	7h00 min	6h12min	5h24min	4h24min	3h18min	6h12min	4h36min	1hr24min
	3	11h06min	10h30min	9h18min	8h06min	6h54min	5h42min	9h18min	6h54min	2h06min
	4	14h48min	14h00min	12h24min	10h48min	9h12min	7h36min	12h24min	9h12min	2h48min

Indicador de carga de batería

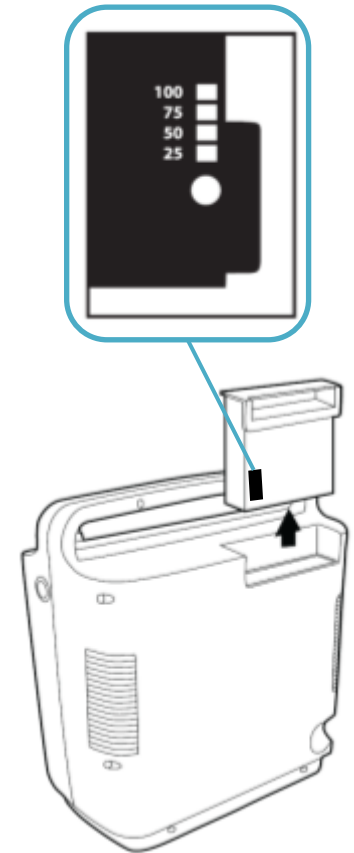

- Accesorios para incrementar la autonomía:
  - Baterías adicionales
  - Cargador de batería externa/ recalibrador



# Mantenimiento

- **Mantenimiento de paciente:**
  - No requiere ningún mantenimiento por parte del paciente.
- **Mantenimiento preventivo proveedor de servicios:**
  - No está recomendado realizar mantenimiento preventivo
  - Filtro bacteriano interno : cambio según la política del proveedor de servicios

# SimplyGo : Pack todo incluido

## Incluido con el SimplyGo

Carro



Bolsa accesorios

SimplyGo con funda de transporte con correa para transporte al hombro



Cable AC (1)



Cable DC (1)



Batería (1)

Manual Usuario



## Accesorios Opcionales

Bolsillo Humidificador  
Tubo humidificador  
Cargador baterías  
Baterías adicionales



# La aproximación adecuada

## SimplyGo & EverFlo

En casa – Todos los días  
SimplyGo para las necesidades  
ambulatorias diarias  
EverFlo para oxigenoterapia  
estacionaria

Fin de semana - Vacaciones  
SimplyGo para uso durante el día y la  
noche.



# Muchas gracias



Bioing. Juan Maradey

Philips Argentina S.A.

Tel. +54.11.4546.7777

Cel: +54.9.11.3685.8918

[juan.maradey@philips.com](mailto:juan.maradey@philips.com)