


Guía de configuración rápida para el proveedor



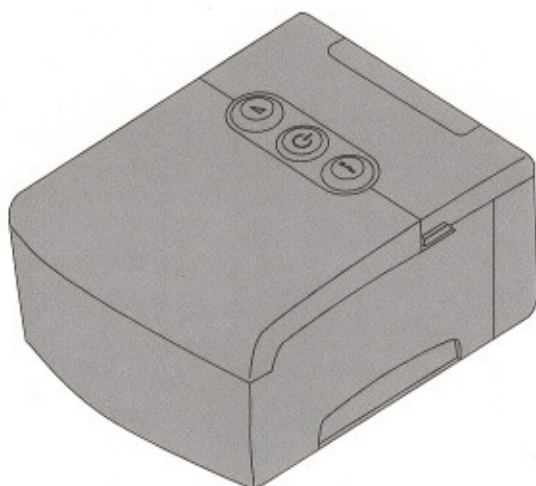

¡IMPORTANTE! *Retire esta guía antes de dar el dispositivo al paciente. Los ajustes de presión deben ser exclusivamente realizados por profesionales médicos.*

Esta guía le proporciona las instrucciones básicas para navegar por la configuración del proveedor y por los menús de datos con el fin de modificar los ajustes del dispositivo. Para obtener más información, consulte el *Manual del proveedor de BiPAP Auto M Series*.

ACCESO A LAS PANTALLAS DEL MODO PROVEEDOR

Accediendo al modo Proveedor se desbloquean ciertos ajustes adicionales que el usuario no puede modificar. Para acceder al modo Proveedor:

1. Enchufe el cable de alimentación de CA al suministro de corriente y a una toma de corriente eléctrica.
2. Mantenga pulsados los botones izquierdo y derecho   mientras enchufa simultáneamente el suministro de corriente al dispositivo. Cuando el dispositivo emita dos pitidos, estará en modo Proveedor y podrá soltar los botones. Aparecerá entonces la pantalla de espera (Standby) del modo Proveedor (se muestra en la página siguiente).

Puede ver y modificar los ajustes prescritos mediante las pantallas de configuración del proveedor y ver datos sobre el uso del dispositivo en las pantallas de datos del proveedor.

CONFIGURACIÓN DEL PROVEEDOR Y NAVEGACIÓN

POR EL MENÚ DE DATOS

Para navegar por las pantallas a partir de la pantalla de espera (Standby) del modo Proveedor:

- Pulse el botón **+** para acceder al menú de configuración del proveedor, o bien pulse los botones **→** o **←** para acceder al menú de datos del proveedor.
- Utilice el botón **→** para navegar a la pantalla siguiente y el botón **←** para navegar a la anterior.
- Utilice los botones **+** y **-** para fijar los ajustes de las pantallas de configuración.

Nota: Una vez que haya terminado de modificar los ajustes, pulse el botón **⏻** para salir del modo Proveedor y regresar al modo Usuario.

DATOS DE CONFIGURACIÓN ADICIONALES

- **Tiempo de subida:**
Es el tiempo que tarda el dispositivo en pasar de EPAP a IPAP. Puede fijarlo en el ajuste deseado (0=150, 1=200, 2=300, 3=400 ms.).
- **Alarma de mascarilla:**
Esta alarma indica que el dispositivo ha detectado una fuga en la mascarilla. Puede activar o desactivar la alarma (0=desactivado, 1=activado).
- **Auto-Off (desactivación automática):**
Puede ajustar el dispositivo para que interrumpa automáticamente la terapia cuando se detecte una desconexión de la mascarilla (0=desactivado, 1=activado).
- **Tiempo de noche dividida:**
Este ajuste indica la cantidad de tiempo transcurrido en terapia binivel antes de la transición a terapia automática binivel (0=desactivado, 120, 180 ó 240 minutos).
- **Visualización de IAH y fugas del sistema:**
Puede seleccionar si en las pantallas de datos se muestran o no el índice de apnea/hipopnea (IAH; AHI por sus siglas en inglés) y los promedios de las fugas del sistema (0=desactivado, 1=activado).
- **Recordatorio para el paciente:**
Mediante el software Encore® Pro, puede redactar el texto de un mensaje personalizado que se mostrará periódicamente al usuario. La pantalla de recordatorio para el paciente le permite especificar la frecuencia con la que desea que aparezca el recordatorio (0, 90, 180, 270, 365 días).

Pantalla de espera (Standby) del modo Proveedor

